

Rychlý test pro kvalitativní detekci GHB/KET v nápoji. Pro osobní použití.

ÚČEL POUŽITÍ

Test na kontrolu nápojů je test pro kvalitativní detekci GHB a ketaminu v nápojích při koncentraci 3,0g/250ml a 1,0g/250 ml.

Test poskytuje pouze orientační výsledky. Pro získání potvrzeného analytického výsledku je třeba použít specifitější alternativní chemickou metodu. Upřednostňovanou konfirmační metodou je GC/MS nebo LC/MS.

SHRNUTÍ

Kyselina gama-hydroxymáselná (GHB), známá také jako kyselina 4-hydroxybutanová, je přirozeně se vyskytující neurotransmiter a psychoaktivní droga. V lékařství se používá jako celkové anestetikum a jako lék na kataplexii, narkolepsii a alkoholismus. Používá se také nelegálně jako omamná látka, ke snaze zvýšit sportovní výkon a jako droga pro znásilnění na schůzce. Jedná se o depresivní látku, která má mnoho přezdívek: easy lay, Georgia home boy, liquid X, liquid ecstasy, liquid E, grievous bodily harm, Gib, G-rific, scoop, soap, salty water, organic Quaalude nebo fantasy. Lékaři ji někdy předepisují k léčbě poruchy spánku zvané narkolepsie^(1,2).

Ketamin (KET) je lékařské a veterinární anestetikum a kontrolovaná látka (ve Spojených státech zařazená do seznamu III)². Jedná se o typ psychedelické drogy, která vyvolává pocit odtržení od reality. Mezi jeho přezdívky patří Special K, vitamin K a kočičí valium. Lékaři a veterináři ji používají jako anestetikum. Někdy se používá při léčbě depresi rezistentních na léčbu v přísně sledovaných podmínkách.

Test kontroly nápojů je rychlý screeningový test na přítomnost drog, který lze provést bez použití přístroje. Test kontroly nápojů poskytuje pozitivní výsledek, pokud množství GHB přesahuje 3,0 g/250 ml a množství ketaminu přesahuje 1,0 g/250 ml.

PRINCIP

Test kontroly nápojů je barevný test založený na principu kolorimetrie. Když je testovaná droga v nápoji, změní se barva skvrny na modrou.

OPATŘENÍ

- Před provedením testu si přečtěte celý návod k použití.
- Pouze pro osobní potřebu.
- Pouze pro externí použití.
- Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Test nepoužívejte, pokud je testovací karta mokrá nebo poškozená.
- Na jedno použití. Po prvním použití zlikvidujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POSKYTOVANÉ MATERIÁLY

- Testovací karta
- Pokyny pro uživatele

MATERIÁLY, KTERÉ JSOU VYŽADOVÁNY, ALE NEJSOU POSKYTOVÁNY

- Hodinky, hodiny nebo časovač


SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené při suché pokojové teplotě. **Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, vlhkosti a tepla.**

NEZAMRAZUJTE.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Naneste kapku nápoje do každého testovacího místa.
2. Každé místo jemně potřete, nemíchejte nápoj na různých místech, počkejte, až zaschne (1-3 minuty).
3. Pokud některý z testů zmodrá, **NÁPOJ NEPIJTE!**
4. **Tento test je určen pouze pro drogy na bázi GHB a ketaminu.**

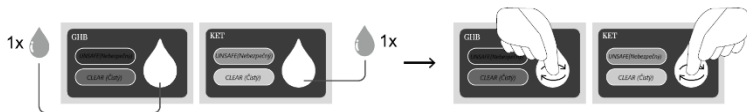

DŮLEŽITÉ: Výsledek, který jste získali, je pouze orientační. Pro potvrzení výsledku je nutné vzorek laboratorně.

Detekční položky, úroveň

Název léku (zkratka)	Zjistitelná úroveň	Název léku (zkratka)	Zjistitelná úroveň
GHB	3,0 g/250 ml	Ketamin	1,0 g/250 ml

[DODATEČNÉ INFORMACE]

1. Co mám udělat před použitím?

Před použitím se ujistěte, že je zkušební plocha suchá, a pečlivě si přečtěte návod k použití.

2. Jak dlouho musím čekat, než skvrna změní barvu?

Po kápnutí kapky nápoje na každé testovací místo testu uvidíte za 1-3 minuty změnu barvy (GHB: žlutá na modrou, KET: růžová na modrou), pokud je váš nápoj namíchaný.

3. Co je falešně pozitivní výsledek?

Falešně pozitivní výsledek testu znamená, že droga není přítomna, ale test ji odhalil. Falešně pozitivní výsledek mohou poskytnout modře zbarvené nápoje nebo likéry, mléčné výrobky nebo nápoje obsahující mléčné výrobky, smetanu nebo olejovité tekutiny.

4. Co je falešně negativní výsledek?

Falešně negativní výsledek testu znamená, že droga je přítomna, ale test ji nezjistil. Koncentrace drogy pod mezní hodnotou může dát falešně negativní výsledek.

[OMEZENÍ]

1. Výsledky tohoto testu jsou určeny pouze pro osobní potřebu a reference.

2. Před použitím se ujistěte, že je zkušební místo suché.

3. Modře zbarvený nápoj nebo likér může vykazovat falešný údaj (falešně pozitivní).

4. Podezřelý nápoj okamžitě zlikvidujte.

5. Tento výrobek by se neměl používat s mléčnými výrobky nebo nápoji obsahujícími mléčné výrobky, smetanu nebo mastné tekutiny.

6. Pozitivní výsledek tohoto produktu by nikdy neměl být použit jako jediný základ pro určení přítomnosti nelegálních drog.

7. Tento test je určen k detekci GHB a ketaminu v reálné koncentraci 3,0 g/250 ml a v reálné koncentraci 1,0 g/250 ml.

[LITERATURA]

1. Quest DW, Horsley J. Field-test of a date-rape drug detection device. J Anal Toxicol. 2007 Jul-Aug;31(6):354-7.

2. Morris JA. Modified cobalt thiocyanate presumptive color test for ketamine hydrochloride. J Forensic Sci. 2007 Jan;52(1):84-7.

[SEZNAM SYMBOLŮ]

	Prostudujte si návod k použití nebo si prostudujte elektronický návod k použití		Obsahuje počet pro <n> testů		Teplotní omezení
	Zdravotnický prostředek pro diagnostické použití <i>in vitro</i>		Číslo šarže		Katalogové číslo
	Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství/Evropskou unii		Datum použitelnosti		Nepoužívat opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a prostudujte si návod k použití		Výrobce		Výstraha



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Číslo: 14602740500

Datum revize: 2023-10-29

Dovozce do EU:



Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.

A-2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55

Phone: ++43(0) 2236 660910/0, e-mail: office@dialab.at