


CRP – RYCHLÝ TEST (VZOREK KRVE)

Nechte všechny součásti testu dosáhnout pokojové teploty

PROVEDENÍ TESTU

- Pomocí kapilární zkumavky (kapátko s užším hrdlem), naberte vzorek krve z prstu, který jste předtím získali použitím přiložené lancetky. Kapilární zkumavka musí být naplněno krví až po její rysku.
- Otevřete si zkumavku s roztokem a přeneste do ní vzorek krve. Zkumavku uzavřete, protřepejte (cca 10 sekund) a vzorek nechte 1 minutu odpočívat.
- Položte testovací kazetu na čistou a rovnou plochu.
- Roztok naberte do přiložené pipetky a přeneste 3 kapky do vzorkové jamky (S)
- Výsledky odečítejte po 5ti minutách.

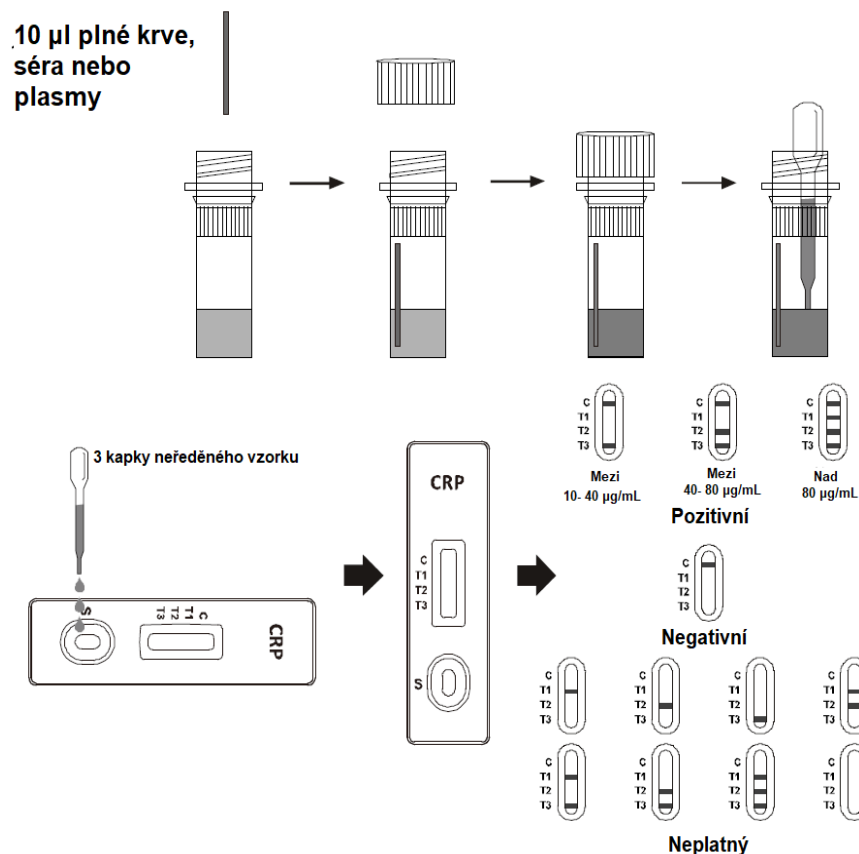

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

- **Pozitivní:** Zobrazí se kontrolní čára (C) a dále:
 - **Testovací čára T3** - hladina CRP je nejméně 10 µg/mL.
 - **Testovací čára T3 a T2** - hladina CRP je nejméně 40 µg/mL.
 - **Testovací čára T3, T2 a T1** - hladina CRP je nejméně 80 µg/mL.

Doporučujeme návštěvu lékaře pro další vyšetření.

- **Negativní:** Zobrazí se barevná čára pouze v kontrolní oblasti – hladina CRP je nižší než 10 µg/mL.. Pokud však příznaky přetrvávají, doporučuje se konzultace s lékařem.
- V případě, že se nezobrazí kontrolní čára, byl test proveden nesprávně a je nutné ho opakovat s novým testem.