

JEDNODRUHOVÝ RYCHLOTEST – TEST ZE VZORKU SLIN

Před vykonáním testu nechce všechny součásti testu dosáhnout pokojové teploty a minimálně 10 minut před testováním si nic nevkládejte do úst – jídlo, nápoje, žvýkačky.


PROVEDENÍ TESTU

KROK 1: Odejměte víčko ze slinné tyčinky.

KROK 2: Pohybujte jazykem proti horní a spodní čelisti a kořene jazyku pro nashromáždění slin, poté umístěte absorpční tampon slinné tyčinky do úst a aktivně vytírejte dásně na obou stranách (10-15x).

KROK 3: Nechte absorpční tampon pod jazykem a čekejte, dokud se tok slin neobjeví v testovacím okénku.

KROK 4: Vyjměte slinnou tyčinku z úst, položte ji na čistý, rovný povrch a čekejte na zobrazení výsledku. Výsledky odečítejte po 3-10 minutách.

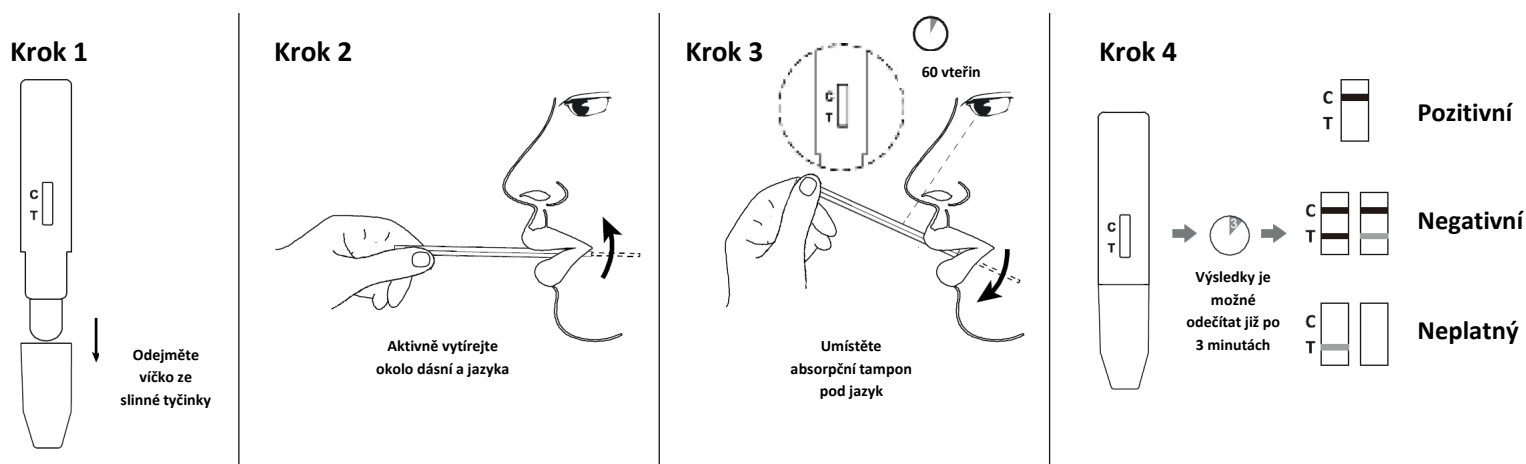

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objeví se dvě barevné čáry

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Barevná čára se objeví pouze v oblasti kontrolní čáry (C). V oblasti testovací čáry (T) se barevná čára neobjeví.

Upozornění – jakýkoli barevný odstín v oblasti testovací čáry (T) značí negativní výsledek

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Neobjeví se barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C)

DIALAB