

RYCHLOTTESTOVACÍ KAZETA – TEST Z MOČI

Nechte všechny součásti testu dosáhnout pokojové teploty

PROVEDENÍ TESTU


Položte testovací kazetu na čistou a rovnou plochu

Odeberte vzorek moči do čisté a suché nádoby. Moč je možné odebírat ve kteroukoli denní dobu.

Pomocí kapátka odeberte vzorek moči z nádoby

Kapátko držte svisle a naneste 3 plné kapky moči do vzorkového otvoru (S) testovací kazety

Výsledky odečítejte po 5-10 minutách.

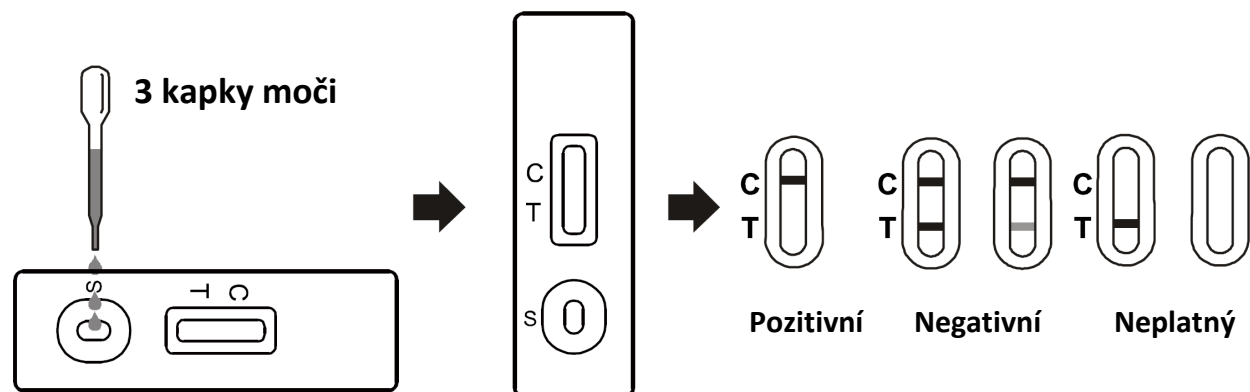

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objeví se dvě barevné čáry

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Barevná čára se objeví pouze v oblasti kontrolní čáry (C). V oblasti testovací čáry (T) se barevná čára neobjeví.

Upozornění – jakýkoli barevný odstín v oblasti testovací čáry (T) značí negativní výsledek

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Neobjeví se barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C)

DIALAB